



Aanbrengen 24-uurs bloeddrukmeter

Vragen?

Als u na het lezen nog vragen heeft,
neem dan contact op met
Glanum Diagnostics.

glanum
diagnostics

Postbus 281
6170 AG Stein
T. +31(0)85 130 58 66
E. info@glanum-diagnostics.com

glanum
diagnostics

1. De bloeddrukmeter

De bloeddrukmeter bestaat uit 2 componenten: de meetunit (witte kastje) en de manchet.

2. Beschermdoekje

Het beschermdoekje beschermt de huid van de patiënt tegen zweten door het dragen van de bloeddrukband. Het doekje kan met een plakbandje vastgezet worden, zie foto's.



3. Koppelen meetunit op manchet

Koppel de meetunit op de manchet, u voelt een klik als deze goed vast zit.



4. Bevestig de manchet om de bovenarm van de patiënt

De rode indicatie op het manchet wordt net boven elleboogholte gelegd. De manchet wordt dan passend om de arm vastgemaakt.



5. Aanzetten bloeddrukmeter

Druk op de aan-uit knop en het scherm van de meetunit licht op. Druk nu nogmaals op de aan-uit knop en de 24uurs bloeddrukmeting gaat van start; de manchet wordt opgepompt". Na 24 uur stopt de meting automatisch.



Belangrijke informatie

Als de bloeddruk meter eenmaal is aangezet, kan deze niet meer uitgezet worden.

De meter stopt vanzelf na 24 uur.

De patiënt kan dan zelf de bloeddrukband afnemen en deze in de retour doos terugsturen.